

# VAGINÁLNÍ TRENAŽÉR INTIMINA KEGELSMART

## Návod



### OVLÁDÁNÍ

- 1) Odšroubujte uzávěr, vložte baterii s plusovým pólem směrem ven a zašroubujte zpět.
- 2) Krátkým stiskem bočního tlačítka se symbolem kroužku jej zapnete.
- 3) LED dioda vám blikne v závislosti na předchozím cvičení, jakou úroveň nastaví.
- 4) Poté máte 30 vteřin na zavedení vajíčka do pochvy.
- 5) Po třiceti vteřinách se spustí sám automaticky.
- 6) Nejprve 3x za sebou třikrát zavibruje, čímž oznámí začátek relace.
- 7) Následně začne vibrovat. V tuto chvíli stlačte své svaly.
- 8) V momentě kdy vibrace ustanou svaly povolte a relaxujte.
- 9) Konec programu vám oznámí opětovně třemi rychlými vibracemi.
- 10) Poté se sám automaticky vypne.

Cvičení by nemělo být delší než 60 minut denně. Při nepohodlí či bolestech jej přestaňte používat a poradte se se svým lékařem.

### ÚDRŽBA

Po každém použití trenážér opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Trenažér je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá. Na trenažér může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!**

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn jedním akumulátorem typu AAA.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vaginální trenažér.