


# VAGINÁLNÍ TRENAŽÉR PERIFIT CARE+ PELVIC FLOOR TRAINER APP CONTROLLED

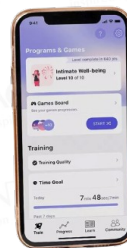

## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Stáhněte si v Google Play či App Store aplikaci s názvem PERIFIT (aplikace je pouze v angličtině, ale je zcela intuitivní).
- 2) Po instalaci budete potřebovat vytvořit registraci, která je snadná a je zdarma.
- 3) V aplikaci naleznete různé články o pánevním dnu, cvičení, rady a tipy a v konečném důsledku také spoustu funkcí pro vaše vlastní cvičení.
- 4) Překvapí vás několik dotazníků, které vytvoří z vašich odpovědí přesný cvičební plán pro vaši potřebu a také tréninkový program.
- 5) Krátkým stisknutím tlačítka „power“ na základně zapnete a vypnete svůj PERIFIT.
- 6) Po zapnutí se rozblíká zelená LED dioda.
- 7) Následně spustíte mobilní aplikaci a dále se řídíte jejími instrukcemi.

### ÚDRŽBA

Po každém použití trenážér opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Trenažér je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá. Na trenažér může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!** **Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek. Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Trenažér disponuje vestavěnou jednorázovou baterií, které má výdrž až 10 let používání. Výrobce na baterii poskytuje pětiletou garanci, což znamená, že pokud dojde baterie do 5 let, získáte od něj nový kus zcela zdarma. Pokud baterie vypoví službu až po pěti letech, nabídne vám nový kus s více než 50% slevou. Stačí výrobce kontaktovat prostřednictvím jeho oficiálních stránek.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

Vaginální trenažér.