

JES-EXTENDER LIGHT JES-EXTENDER ORIGINAL JES-EXTENDER TITANIUM JES-EXTENDER SILVER JES-EXTENDER GOLD

Návod

PŘÍPRAVA

1) Před upevněním plastového nosiče se ujistěte, že na obou stranách šroubu je prostor 1mm, jak směrem k šestihranu, tak k základnímu plastovému prstenci. To umožňuje šrouby rozšiřovat na obě strany.

JAKÁ JE VAŠE OSOBNÍ DÉLKA?

- 1) Po nalezení vhodných prodlužovacích tyčinek, které vyhovují délce vašeho penisu, by celková délka zařízení měla být o něco delší, než váš penis v klidném, ale úplně natáhnutém stavu.
- 2) V případě potřeby přidejte vhodné množství tyčinek.

PŘIPOJTE PLASTOVÝ NOSIČ

- 1) Nyní připevněte nosič zasunutím tyčinek do otvorů v nosiči, zatlačte směrem k prstenci pevně proti pružinám a pokračujte, dokud neuslyšíte kliknutí. To znamená, že nosič je bezpečně připevněný k tyčinkám.
- 2) Do přední části nosiče vložte silikonovou hadičku nebo do podélných otvorů komfortní pásek.

NASAĎTE TO

- 1) Povolte silikonovou hadičku (nebo pásek) a zařízení nasuňte přes penis.
- 2) Zatlačte plastový nosič směrem k sobě, dokud se pružiny nestlačí dolů.
- 3) Utáhněte silikonovou trubičku (nebo pásek) za hranu vašeho žaludu.
- 4) Váš penis by měl být ochablý, přesto natáhnutý.
- 5) Hadička by měla být upevněná v zářezech umístěných zespodu plastového nosiče.
- 6) Pokud jde do zářezu těžko uchytnit, hadičku trochu natáhněte, aby byla užší.
- 7) Jestliže používáte popruh, jednoduše ho utáhněte, dokud nedosáhnete pevného uchycení penisu.

PŘIDEJTE VÍCE TAHU

- 1) Uvolněte nosič a nechejte pružiny znova roztáhnout. Měli byste cítit uvolnění tahu na penisu.
- 2) Jestli tomu tak není, nepoužili jste na začátku vhodné množství nebo vhodnou délku tyčinek.
- 3) Měli byste se vrátit na začátek a přidávat takové tyčinky tak, abyste dosáhli větší délky.
- 4) Až budete mít vhodné tyčinky, začněte otáčet současně šrouby na obou stranách dovnitř.
- 5) Uvidíte, že se šroub po obou stranách natahuje a také natáhnutí penisu by mělo být teď viditelné.

NAJDĚTE SVOU ÚROVEŇ TAHU

- 1) Při otáčení šroubu je natáhnutí penisu viditelné a vy vidíte šestihrany, jak se zasouvají do tyčinek (viditelné jen při nasazeném zařízení). Čím větší zasunutí, tím je síla tahu větší.
- 2) Pokud dosáhnete značky č. 3, tah je 900 gramů, značka č. 2 je 1200 gramů a č. 1 je 1500 gramů.

NEJDĚTE MOC DALEKO!

- 1) Když budete pokračovat v otáčení šroubu moc dlouho, uvidíte, jak se vysouvá závit, což znamená, že je nutné v otáčení přestat!
- 2) Když jste nedosáhl dostatečného množství tahu (první značky, nejdříve 900 gramů) a stále vidíte závit, měli byste přidat delší prodlužovací tyčinky a zkusit to znovu.

POMALÝ NÁCVIK

- 1) Při používání přístroje postupujte pomalu!
- 2) V prvním týdnu ho při tahu 900 g používejte 1 hodinu.
- 3) Pokračujte postupným přidáváním síly a délky nošení, tímto tempem se vyvarujete bolesti.

PROSTŘEDKY OCHRANY

- 1) Jestliže vás to zpočátku bolí v místě, kde se trubička nebo popruh dotýká pokožky, můžete použít ochrannou podložku, například polštář.

JAK JEJ NOSIT

- 1) Extender můžete nosit v jakémkoliv vhodném úhlu.
- 2) Vyzkoušejte a uvidíte, jaká poloha je pro vás nejpohodlnější.

ODLOŽENÍ

- 1) Pokud chcete Extender sundat, jednoduše uvolněte trubičku (popruh) a odtáhněte - vysuňte přístroj směrem od vás.

NĚKOLIK RAD PRO VÁS

- 1) Buďte trpělivý s používáním i s výsledky! Nejde o sprint, ale o maratón.
- 2) Průměrné přírůstky jsou 10% ve vzpřímené délce (8% v obvodě) po 400 hodinách používání při 1200 gramové síle tahu.
- 3) Většina mužů může 400 hodin dosáhnout během dvou měsíců, takže byste měl být schopen dosáhnout 30% zvětšení délky za 6 měsíců.
- 4) Nová délka penisu je trvalá a přístroj už není nutné používat, abyste délku zachoval.
- 5) Další užívání vám poskytne následující výsledky, ale prosím nezacházejte do extrémů a zastavte používání po přiměřeném zvětšení.
- 6) **Podívejte se na celé podrobné 3D instruktážní video.**