

ZVĚTŠOVAČ PENISU MALEEDGE EXTRA, BASIC, PRO



Návod

DVOJCESTNÝ PŘEDNÍ DÍL

- 1) Jestli je váš penis přes 12,5 cm dlouhý v ochablém a natáhnutém stavu, je nutné otočit přední nosič/gumový řemínek.
- 2) Pokud máte méně než 12,5 cm, může přední nosič zůstat v původní poloze.

ZÁKLADNÍ PRSTENEC

- 1) Oddělte přední nosič s gumovým páskem od tyčinek.
- 2) Umístěte pásek kolem kořene penisu a nechejte ho tam.

PŘIZPŮSOBIVÝ POPRUH

- 1) Umístěte a utáhněte pásek za žalud.
- 2) Jestliže jste neobřezaný, pásek můžete nosit na horní části předkožky nebo podle toho, co je pro vás pohodlnější.

NASTAVTE DÉLKU TYČINEK

- 1) Otočte tyčinky ve směru hodinových ručiček o čtvrtinu otáček a vytáhněte tyčinky směrem ven na požadovanou délku.
- 2) Pokud jste spokojen s délkou tyčinek, otočte je zpět proti směru hodinových ručiček, uslyšíte "dvojitě kliknutí".

NEPŘEKRAČUJTE DÉLKU TYČINEK

- 1) Ujistěte se, že postranní tyčinky jsou vytažené maximálně do poslední sady otvorů.
- 2) V případě, že tyčinky vyklouznou a odpojí se, zatlačte dvojitě konce k sobě a nasuňte tyčinky zpět.

ZAKLAPNĚTE PŘEDNÍ NOSIČ S GUMOVÝM PÁSKEM DO TYČINEK

- 1) Když jsou tyčinky pro vás ve správné pozici, jemně je zatlačte zpět k tělu.
- 2) Nyní je nutné přední nosič pevně připevnit na postranní tyčinky zatlačením k sobě.
- 3) Opět počkejte až se ozve cvaknutí, které signalizuje, že přední nosič je správně nasazený.

ZJISTĚTE SI SÍLU TAHU

- 1) Sílu tahu vidíte v přehledném vále s indikátory, který se nachází těsně u základního prstence.

ZVYŠTE SÍLU TAHU

- 1) Přesuňte tyčinky směrem dopředu jemným zatlačením palců a posuňte tyčinky dopředu, dokud neuslyšíte kliknutí.
- 2) Nezapomeňte posunout prodlužovací tyčinky maximálně na poslední otvor.

ROZVRH NA POSTUPNÉ ZVÝŠENÍ TAHU A DOBY NOŠENÍ

- 1) 8-1200g / 28-42oz 1
- 2) 8-1200g / 28-42oz 2
- 3) 1200g / 42oz 3
- 4) 1200g / 42oz 4
- 5) 1200-2000g / 42-71oz 5
- 6) 1200-2000g / 42-71oz 6

NOŠENÍ A ÚDRŽBA

- 1) MaleEdge je flexibilní ve svém designu.
- 2) Zařízením můžete pohybovat nahoru nebo dolů a zvolit tak pro sebe nejpohodlnější pozici.
- 3) Pokud chcete MaleEdge nosit přes den, můžete ho nosit ve volných boxerských šortkách a volných kalhotách.
- 4) Můžete ho též nosit v noci, ale závisí to od toho, zda se ve spánku hýbete nebo spíte klidně.
- 5) MaleEdge je vysoce kvalitní přístroj, má jednoduchou údržbu.
- 6) MaleEdge a gumový pásek doporučujeme umývat mýdlem a vlažnou vodou, je možné jej umývat v myčce na nádobí, případně můžete použít **čistič erotických pomůcek**
- 7) Ujistěte se, že jste během čištění **oddělili přední nosič s gumovým páskem a prodlužovací tyčinky**.