

ZPŮSOB POUŽITÍ

PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM

Obsah

Strana

1. DEFINICE	2
2. OPIS	2
3. URČENÍ	2
4. VLASTNÍ NASTAVENÍ Andropenisu®	3
5. NASAZENÍ Andropenisu®	4
6. ZAKŘIVENÝ PENIS A CHOROBA PEYRONIEHO	6
7. ZPŮSOB POUŽITÍ Andropeyronie® (PRO ZAKŘIVENÝ PENIS A PEYRONIEHO CHOROBU)	7
8. ZPŮSOB POUŽITÍ Andropeyronie® Surgery Edition (UROLOGICKÁ POST OPERACE)	8
9. ZPŮSOB POUŽITÍ Andropenis® (PRO ZVĚTŠENÍ PENISU)	9
10. VAROVÁNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ	10
11. POMÁDY	11

POZNÁMKA:

Andropenis® existuje v následujících modelech: **Andropenis®** (vyroben z hliníku, základní verze), **Andropenis Gold®** (vyroben se zlatem, verze Deluxe), **Andropenis Mini®** (pro penis kratší než 8 cm ve stavu erekce), **Andropeyronie®** (vyroben z hliníku, upraven pro korekci zakřivení), **Andropeyronie® Surgery Edition** (vyroben z hliníku, upraven pro pooperační používání) a **Androextender®** (vyroben z hliníku, základní verze). Návod k použití je stejný pro všechny modely.



fig. 1

1. DEFINICE

Andropenis® je lékařské zařízení které se externě připevňuje na penis. V kombinaci s tkání penisu vytváří lehký tah na penis prostřednictvím progresivní a nastavitelné síly, která se přizpůsobí potřebám pacienta. Je určen pro estetické a lékařské použití. Před prvním použitím, navštivte lékaře a postupujte podle jeho pokynů.

2. OPIS

Andropenis® je složen z plastového základního kroužku, dvou kovových hřídelů s vnitřními pružinami a horní plastové opory se silikonovým páskem. Plastové díly jsou vyrobeny z POM (syntetický materiál, který není napadán hořlavými tekutinami jako alkohol). Pásek je vyroben ze silikonu lékařské klasifikace. Kovové hřídele Andropenisu Gold® jsou vyrobené z mosazi a pozlacené vrstvou 24 karátového zlata. Pružiny jsou vyrobené z nerezavé oceli a hřídele z hliníku operační klasifikace.

Poznámka: Všechny materiály a součástky tohoto zařízení jsou vyrobeny podle standardů kontroly kvality (ISO: 13485:2003 a ISO 9001:2008), jsou biokompatibilní a nejsou citotoxické (přidružená ISO 10993) a jejich používání nepředstavuje žádné riziko pro zdraví.

Díly (obr. 1): 1 – plastový základní kroužek, 2 – zaokrouhlená přírubová matice, 3 – závitová tyč, 4 – nastavitelný hřídel se závitem, 5 – kovový hřídel, 6 – šroub, 7- pružina, 8 – šroub pro zabezpečení pružiny, 9 – velká, 4 cm dlouhá tyčka (1,6"), 10 – střední, 2 cm dlouhá tyčka (0,8"), 11 – malá, 0,5 cm dlouhá tyčka (0,2"), 12 – nejmenší, 0,3 cm dlouhá tyčka (0,1"), 13 – horní plastová opora, 14 – silikonový pásek, 15 – ochranní poduška, 16 – silikonové kroužky

POZNÁMKA: Odporoučí se jemně naolejovat malou kapičkou oleje (s pomocí hadříku) mezi díly 4 a 5 pro snadnější klouzání (viz. OIL)

3. URČENÍ

- ☑ Ošetření při chorobě Peroniego a korekce jiných dědičných zakřivení penisu.
- ☑ Ošetření mužského hypogonadismu s mikropeniselem nebo malým penisem.
- ☑ Estetické ošetření pro zvětšení délky a šířky penisu
- ☑ Pooperační ošetření při některých urologických operacích (prostataktomie, operace penisu, traumatismus, zlomenina penisu, atd.) pro zabránění zkrácení penisu kvůli smrštění jizvy.
- ☑ Zlepšení tvrdosti penisu pro pohlavní styk zvětšením velikosti (objemu a délky) a zlepšením tvaru.

Kontraindikace: Pacienti s neléčenou cukrovkou, opary v oblasti genitálií, záňety močových cest a močového měchýře, nakažení pohlavně přenosnými chorobami, se zvětšenou prostatou, kýlou, rakovinou varlat, rakovinou lymfatických uzlin, lymfomy, paraplegií, kvadruplegií a pacienti s předepsanými léky k ředění krve. Výsledek přípravku se nedostaví, pokud je úroveň hormonu testosteronu nízká či podprůměrná. Přípravek je určen k použití od 18 let věku.

Postranní účinky: Andropenis® byl vyvinut specificky pro lékařské používání a jeho používání nemá žádné postranní účinky pokud se používá správně podle pokynů popsanych v tomto návodu na použití.




4. VLASTNÍ NASTAVENÍ Andropenis®

Počáteční nastavení **Andropenisu®** je 8 cm (3,1"). Tento rozměr je měřen od spodní části plastového kroužku ke konci kovového hřídelu (obr. 4, POČÁTEČNÍ)

Nastavte váš **Andropenis®** podle velikosti vašeho penisu.

Použitím páskového metru změřte délku a obvod penisu v stavu bez erekce a pak v stavu erekce (obr. 2 a 3).

Vypočítejte vlastní velikost **Andropenisu®** odečtením 4 cm (1,6") od velikosti vašeho penisu v stavu erekce.

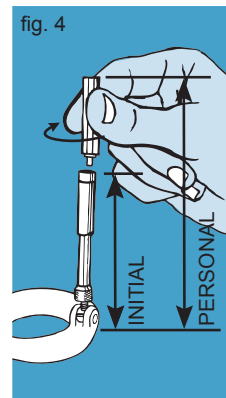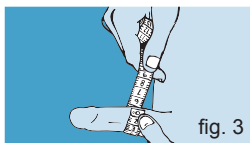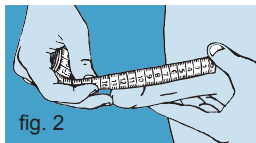

Příklad: 14,7 cm – 4 cm = 10,7 cm > Vlastní velikost Andropenisu® = 10,7 cm

Teď připravte zařízení tak aby odpovídalo vaší vlastní velikosti.

Nejprve odeberte horní plastovou oporu jejím zvednutím (obr. 5), pak přidejte tolik hřídelů kolik je zapotřebí pro dosažení vlastní velikosti Andropenisu® (obr. 4, VLASTNÍ).



Příklad: Vlastní velikost 10,7 cm. = Počáteční velikost Andropenisu® (8 cm) + díl 10 (2 cm) + díl 11 (0,5 cm)

Poznámka: Počáteční velikost Andropenisu Mini je 7 cm. Máte-li tuto verzi, začněte období adaptace s touto velikostí (7 cm) a zachovejte tento rozměr po dobu 15 dnů: první den používejte zařízení 3 hodiny, v následujících dnech zvyšujte postupně dobu používání. Po prvních 15 dnech zvýšte čas používání tak jak je to indikováno v tabulkách používání (vid. níže)

5. NAsAZENÍ Andropenis®

Vložte jeden z modelů silikonového pásku (díl 14) který nejlépe odpovídá ochranní podušce podle velikosti penisu (díl 15). Používání ochranní podušky je **POVINNÉ**. Vložte konce silikonového pásku do děr na zadní straně horní plastové opory (díl 13), tak aby pásek vytvořil slučku.




V stavu bez erekce stáhněte předkožku na tělo penisu (muži, kteří nejsou obřezáni) a umístěte silikonový kroužek pod korunku žaludu, tam kde se střetává s válcovou částí penisu (obr. 8).

Žalud nesmí přijít do přímého kontaktu se zařízením. Pak natáhněte penis od těla tak aby byl natažen v stavu bez erekce.

Uchopte základní kroužek (díl 1) tak aby nejužší část kroužku směřovala nahoru. Penis vložte přes základní kroužek (díl 1) a nechte ho na horní plastové opoře (díl 13) a zatlačte zařízení proti tělu, tím se stlačí vnitřní pružiny (obr. 9).

Zatímco podržte levou ruku v této pozici, pomocí prstů pravé ruky protáhněte žalud přes slučku vytvořenou silikonovým páskem. (obr. 10).

Položte palec levé ruky na vrch žaludu pro udržení penisu na místě, zatímco postupně zkrátíte silikonovou slučku taháním za oba konce pásku pravou rukou (obr. 11).

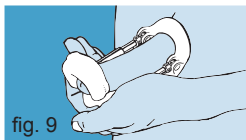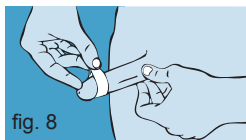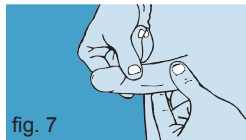


Pomalou táhněte pokožku na obou stranách penisu směrem k tělu aby jste zabránili přiskřípnutí pokožky nebo ponechání přeložení přes drážku žaludu (obr. 12).

Silikonová slučka by měla být zachycená a zarovnána s koncem drážky žaludu bez toho aby škodila ale dostatečně silně aby zabránila vysmeknutí se žaludu. Opatrně zabezpečte silikonový pásek do úchytky na spodní straně vrchní opory (díl 13) zatím co ho natahujete. Upevněte ale nezatačte směrem dolu aby jste zabránili přiskřípnutí penisu.

Zkontrolujte znovu nenachází-li se pokožka přes drážku žaludu nebo pod silikonovým páskem. Zůstala -li tam, potáhněte pokožku směrem k tělu aby jste přešel její přiskřípnutí.



Pro sundání **Andropenisu®** stlačte pružiny zatlačením směrem k tělu, uvolněte silikonový pásek (díl 14) z úchytky v horní opoře (díl 13) a zvětšete velikost silikonové slučky pro uvolnění penisu.

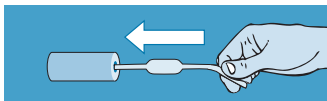

Andropenis® používá pro uchycení žaludu systém pásku zvaného **Androcomfort® band** (pásek). K dispozici jsou dva modely: **Androcomfort® band** a **Androsilicone® band**. **Androcomfort® band** umožňuje ještě pohodlnější používání **Andropenisu®**. Umísťuje se mezi žalud a válcovou část penisu, oblast předkožky-coronal sulcus.

Andropenis® obsahuje silikonový kroužek který funguje jako systém tlumení zvaný **Androring®**. Leží mezi žaludem a válcovou částí penisu, předkožka-coronal sulcus.

Andropeyronie® má horní plastový díl (**Androsupport**) přizpůsoben pro korekci zakřivení penisu (prohlédněte si příložen „Návod k použití Androsupportu“).

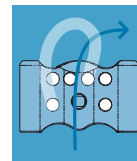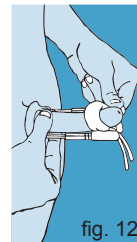

6. ZAKŘIVENÝ PENIS A CHOROBA PEYRONIEHO

Základní lékařská informace: Penis je složen se dvou sloupců z tkáně jakoby spongie které se nazývají topořivé tělesa a močové trubice, přes kterou se vylučuje moč z těla. Tyto topořivá tělesa jsou obklopeny elastickým tkánivem zvaným tunica albuginea.

Existují dva typy zakřivení penisu:

- ☒ **Choroba Peyronieho** (může se objevit v jakémkoliv věku)
- ☒ **Dědičné zakřivení penisu** (obvykle se objevuje u mladých mužů)



Choroba Peyronieho, nebo tvrdnutí penisu, je proces kterého příčina není známa a charakterizuje se fibrózním (tvrdým) páskem na tunica albuginea penisu. Tyto pásy mají tendenci být unilaterální (na jedné straně penisu) a výsledkem je, že penis dostane zakřivený tvar při erekci.

Nejčastější příznaky jsou deformace penisu, bolest při erekci a erektilní dysfunkce. Postihuje přibližně 1% bělošské mužské populace. 75% případů se vyskytuje u mužů ve věku mezi 45 a 60 let.

Možnosti lékařského léčení:

- ☒ **Verapamil:** Injekce do fibrózní plotničky pro zablokování produkce kolagenu. (Provádějí se studie s injekcemi Interferonu)
- ☒ **Andropeyronie®:** proteze bez implantace aplikovaná na penis, která působí trakční silou a produkuje redukcí zakřivení až do 50%.
- ☒ **Vitamin E nebo Kolchicin:** užívá se orálně jako podpora.
- ☒ **Kombinované léčení:** Andropenis® plus Verapamil plus vitamin E. Kombinace těchto metod byla navržena jako lékařský ambulantní protokol pro léčení choroby Peyronieho. Před započítím jakéhokoliv léčebného režimu konzultujte vašeho urologa.
- ☒ **Operace:** odstranění fibrózní plotničky. Postranním efektem je vždy zkrácení penisu nebo implantace externí proteze. Aby se tomu zabránilo, měl by se použít aparát pro zvětšení penisu (**Andropeyronie® Surgery Edition**)

Dědiční zakřivení penisu detekováno u mladých mužů. Příčinou je že topořivé tělesa rostou více než močovod. Výsledkem je zakřivení při erekci směrem dolu nebo do jedné strany. Léčební možnosti jsou operace a / nebo aplikace **Andropeyronie®** po dobu 6 měsíců.

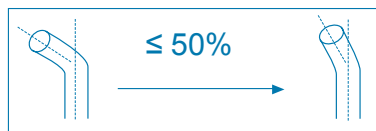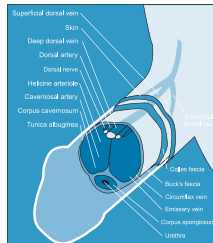

7. ZPŮSOB POUŽITÍ Andropeyronie® (PRO ZAKŘIVENÝ PENIS A CHOROBU PEYRONIEHO)

Procedura je typicky složená z dvou období (kromě případu, když lékař určí jinak):

- Adaptační období trvající 15 dnů
- Evoluční období skládající se z tří oddělených fází: Počáteční evoluční fáze (první a druhý měsíc), střední fáze (třetí a čtvrtý měsíc) a koneční evoluční fáze, která začíná v pátém měsíci.


Jakákoliv odchylka od programu procedury může ovlivnit dosažené výsledky (konzultujte s vaším lékařem).

	VELIKOST ZAŘÍZENÍ	Denní doba
	Adaptační období	
Prvních 5 dnů	Vlastní velikost	3 hodiny
Den 6 - 10	Přidejte malou 0,5 cm tyčku (díl 11)	6 hodin
Den 11 - 15	Přidejte malou 0,5 cm tyčku (díl 11)	8 hodin
	Evoluční období	
První a druhý měsíc	Přidejte malou 0,5 cm tyčku (díl 11) každých 7 dnů	9 hodin
Třetí a čtvrtý měsíc	Přidejte malou 0,5 cm tyčku (díl 11) každých 10 dnů	9 hodin
Od pátého měsíce	Přidejte malou 0,5 cm tyčku (díl 11) každých 15 dnů	9 hodin

Poznámka: pro váš vlastní komfort, od pátého měsíce je možné přidat nejdříve tyčku 0,3 cm (díl 12) a o několik dnů ji změnit za tyčku 0,5 cm (díl 11) aby bylo natahování progresivnější.

První den, jako cvičení, nasadte a sundejte zařízení 10 krát po sobě. V případě zakřivení se doporučují uchytit zařízení mimo zakřivení. Každé 2 hodiny je potřebné sundat zařízení na několik minut aby se tkáň uvolnila. Po pátém měsíci by se tyto přestávky měly realizovat každých 1,5 hodiny. Využijte tyto přestávky pro lehkou masáž penisu. Zařízení umyjte vodou a PH neutrálním mýdlem každé 4 dny.

Buďte trpělivý a konstantní s kúrou, je to klíč pro dosáhnutí vašich cílů. První výsledky se objeví po 1,5 měsících kúry (15 dnů adaptačního období následováno prvním měsícem kúry).

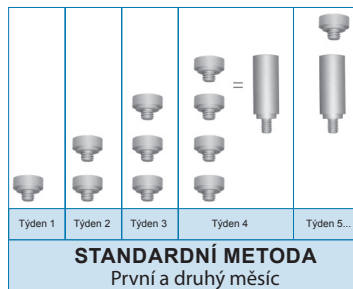

8. ZPŮSOB POUŽITÍ Andropeyronie® Surgery Edition (PRO UROLOGICKOU POST OPERACI)

Je-li operace jednoduchá, doporučují se začít s používáním **Andropeyronie® Surgery Edition** 15 dnů po operaci.

Je-li operace velice komplikovaná, doporučují se začít s používáním **Andropeyronie® Surgery Edition** 1 měsíc po operaci.

Vždy se poraďte s Vaším lékařem ohledně doby, kdy můžete po operaci začít **Andropeyronie® Surgery Edition** a jak dlouho.

Procedura je typicky složená z dvou období (kromě případu, když lékař určí jinak):


- Adaptační období trvající 15 dnů.
- Evoluční období skládající se z dvou oddělených fází: Počáteční evoluční fáze (první a druhý měsíc) a koneční evoluční fáze, která začíná v třetím měsíci.

Jakákoliv odchylka od programu procedury by měla být konzultovaná s vaším chirurgem).

	VELIKOST ZAŘÍZENÍ	Denní doba
	Adaptační období	
Prvních 5 dnů	Vlastní velikost	3 hodiny
Den 6 – 10	Přidejte malou 0,5 cm tyčku (díl 11)	6 hodin
Den 11 – 15	Přidejte malou 0,5 cm tyčku (díl 11)	8 hodin
	Evoluční období	
První a druhý měsíc	Přidejte malou 0,5 cm tyčku (díl 11) každých 7 dnů	8 hodin
Od třetího měsíce	Přidejte malou 0,5 cm tyčku (díl 11) každý měsíc	8 hodin

Poznámka: pro váš vlastní komfort, od třetího měsíce je možné přidat nejdříve tyčku 0,3 cm (díl 12) a o několik dnů ji změnit za tyčku 0,5 cm (díl 11) aby bylo natahování progresivnější.

První den, jako cvičení, nasaďte a sundejte zařízení 10 krát po sobě. Doporučí se umístit zařízení jeden den směrem nahoru, následující den na jednu stranu a následující den na druhou stranu. Každé 2 hodiny je potřebné sundat zařízení na několik minut aby se tkáň uvolnila. Po pátém měsíci by se tyto přestávky měly realizovat každých 1,5 hodiny. Využijte tyto přestávky pro lehkou masáž penisu. Zařízení umyjte vodou a PH neutrálním mýdlem každé 4 dny. Buďte trpěliví a konstantní s kúrou, je to klíč pro dosažení vašich cílů. První výsledky se objeví po 1,5 měsících kúry (15 dnů adaptačního období nasledováno prvním měsícem kúry).

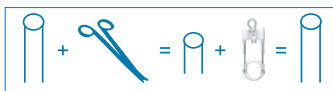

9. ZPŮSOB POUŽITÍ Andropenis® (PRO ZVĚTŠENÍ PENISU)

Procedura je typicky složená z dvou období (kromě případu, když lékař určí jinak):

- ▣ Adaptační období trvající 15 dnů.
- ▣ Evoluční období skládající se z tří oddělených fází: Počáteční evoluční fáze (první a druhý měsíc), střední fáze (třetí a čtvrtý měsíc) a koneční evoluční fáze, která začíná v pátém měsíci.

Jakákoliv odchylka od programu procedury může ovlivnit dosažené výsledky (konzultujte s vaším lékařem).


Lékařská praxe doporučí výběr ze dvou způsobu použití:

	STANDARDNÍ METODA			SPECIALNI METODA	
	VELIKOST ZAŘÍZENÍ	DENNÍ DOBA		VELIKOST ZAŘÍZENÍ	DENNÍ DOBA
	Adaptační období			Adaptační období	
Prvních 5 dnů	Vlastní velikost	3 hodiny	Prvních 5 dnů	Vlastní velikost	4 hodiny
Den 6 - 10	Přidejte malou 0,5 cm tyčku (díl 11)	6 hodin	Den 6 - 10	Přidejte malou 0,5 cm tyčku (díl 11)	4 hodiny
Den 11 - 15	Add a small 0.5cm shaft (piece 11)	8 hodin	Den 11 - 15	Add a small 0.5cm shaft (piece 11).	4 hodiny
	Evoluční období			Evoluční období	
První a druhý měsíc	Přidejte malou 0,5 cm tyčku (díl 11) každých 7 dnů	9 hodin	První a druhý měsíc	Přidejte malou 0,5 cm tyčku (díl 11) každé 3 dny	4 hodiny
Od třetího měsíce	Přidejte malou 0,5 cm tyčku (díl 11) každých 10 dnů	9 hodin	Od třetího měsíce	Přidejte malou 0,5 cm tyčku (díl 11) každých 10 dnů	4 hodiny
Od pátého měsíce	Přidejte malou 0,5 cm tyčku (díl 11) každých 15 dnů	9 hodin	Od pátého měsíce	Přidejte malou 0,5 cm tyčku (díl 11) každých 15 dnů	4 hodiny

Poznámka: pro váš vlastní komfort, od pátého měsíce je možné přidat nejdříve tyčku 0,3 cm (díl 12) a o několik dnů ji změnit za tyčku 0,5 cm (díl 11) aby bylo natahování progresivnější.

První den, jako cvičení, nasadte a sundejte zařízení 10 krát po sobě. Odporují se nasadit zařízení jeden den směrem nahoru, následující den na jednu stranu a následující den na druhou stranu. Každé 2 hodiny je potřebné sundat zařízení na několik minut aby se tkáň uvolnila. Po pátém měsíci by se tyto přestávky měly realizovat každých 1,5 hodiny. Využijte tyto přestávky pro lehkou masáž penisu. Zařízení umyjte vodou a PH neutrálním mýdlem každé 4 dny.

Budte trpělivý a konstantní s kúrou, je to klíč pro dosažení vašich cílů. První výsledky se objeví po 1,5 měsíci kúry (15 dnů adaptačního období nasledovano prvním měsícem kúry).

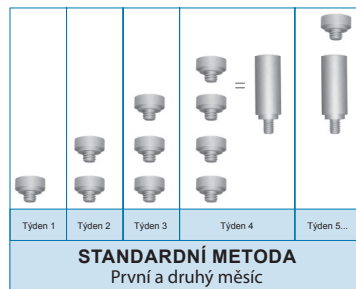

10. VAROVÁNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ

Ačkoliv normálně se neobjevují problémy s pohodlím, je možné že některé dny se budete cítit se zařízením nepohodlně. Neobávejte se a pokračujte s používáním zařízení. Avšak je-li to zapotřebí, můžete kúru přerušit na jeden den.

Objeví-li se bolest nebo nepohodlí, modravé podbarvení nebo necitlivosti na žaludu, sundejte zařízení a masírujte penis. Po tom se vrátí normální barva penisu a nepříjemný pocit zmizne. Cítíte-li nepohodlí na základně žaludu, měl by jste zkusit nosit bavlnu nebo gázu pro chránění této citlivé oblasti.

Nebyl-jste li schopen nosit zařízení po dobu 15 až 30 dnů, začněte kúru s délkou o 1 cm (0,4") menší než předcházející délka. Po 5 dnech ji zvětšete o 0,5 cm (0,2") a zopakujte zvětšení o 0,5 cm (0,2") po dalších 5 dnech. Po těchto 10 dnech adaptačního období se vraťte ke zvolené metodě.

Po sundání zařízení můžete cítit pocit chvění. Ani proto se nemusíte obávat. Důvodem je uvolnění tkáně po natahování.

Poškrabání penisu, reakce pokožky penisu na vzdálené části těla penisu (místo kde se aplikuje silikonový pásek) a na základně penisu (místo kde se aplikuje plastový kroužek), bolest, změny barvy penisu, necitlivosti na žaludu, pocit chvění, edém, nebo retence tekutin v žaludu, rána, iritace, otok a nepohodlí jsou identifikovány jako postranní riziko. Objeví-li se některé z těchto postranních rizik při používání tohoto zařízení, silně doporučujeme přerušit jeho používání a postupovat podle doporučení pro odpovídající případ, které jsou uvedeny v Části 11 tohoto návodu na používání.

- ❗ Nepoužívejte **Andropenis®**: při spánku, namáhavé fyzické aktivitě nebo sportu; když jste pod vlivem drog nebo alkoholu; máte-li vřed, pohlavně nakažlivou chorobu nebo ránu v oblasti pohlavních orgánů; máte-li zmenšenou sílu v ruce nebo těžkosti s manipulací se zařízením; při pohlavním styku.
- ❗ Striktně udržujte hygienu při používání zařízení
- ❗ Sundejte si zařízení při močení a stolici
- ❗ Máte-li erekci při používání zařízení, neobávejte se: jednoduše budete mít pocit mírné těsnosti.
- ❗ Vidíte-li bílé oblasti na žaludu, neobávejte se: jsou to oblasti edému nebo retence tekutin. Příčinou může být příliš těsná slučka. Masírujte zónu a pravděpodobně zmizí.

Vyvinou-li se na žaludu bílé body, je nevyhnutné navštívit lékaře. Je možné, že se jedná o hubovou infekci. Osobní hygiena je velice důležitá. Udržujte zařízení čisté.

DŮLEŽITÉ: Užívání medikamentů pro stimulaci růstu vlasů nebo pro zesílení vlasů, medikamenty pro léčbu deprese, pilulky na spaní, uklidňující pilulky a sedativa mohou výrazně snížit efektivnost **Andropenisu®**.

Neschopnost dosáhnout erekci která by umožnila pohlavní styk může být znakem vážného zdravotního problému. Konsultujte vašeho lékaře aby jste zabránil potenciálně škodící prodlevě v diagnóze.

Upevňovací systém **Andropenisu®** k žaludu může ve zvláštních případech vést k podráždění nebo pocitu nepohodlí v oblasti. Aby se tomu předešlo, doporučují se používat předběžné opatření a část **Androcomfort® band** která se dodává. Všímnete-li si nějaké podráždění, doporučíme pomády které můžete koupit preventivně, avšak doporučíme vám navštívit lékaře.

POMÁDY PROTI PODRÁŽDĚNÍ / ANTIBIOTICKÉ POMÁDY

V případě menšího podráždění, poškrabání penisu nebo reakce pokožky penisu na vzdáleném konci válcové části penisu (místo kde se aplikuje silikonový pásek) nebo na základně penisu (místo kde se aplikuje plastový kroužek): aplikujte pomádu večer a používejte zařízení přes den až do zmizení příznaků. Zůstanou-li příznaky, kontaktujte vašeho lékaře.

HOJÍCÍ POMÁDA / OXID ZINEČNATÝ

Vyvine-li se rána nebo vřed:

- ☒ Nepoužívejte zařízení po dobu 4 dnů. Aplikujte pomádu proti podráždění dva krát denně, ráno a odpoledne, a hojící pomádu v noci. Zůstane-li rána, přerušte používání zařízení a kontaktujte vašeho lékaře.

PROTIZÁNĚTLIVÁ POMÁDA

Objeví-li se jakýkoliv zánět nebo edém na žaludu, základně penisu nebo v pubické oblasti, aplikujte protizánětlivou pomádu jako „Cortaid“. Protizánětlivá pomáda je vhodnou kúrou také proti retenci tekutin v žaludu.

HYDRATAČNÍ KRÉM

Cítíte-li nepohodlí na válcové části penisu masírujte penis hydratačním krémem 5 minut každou noc jemnými natahujícími pohyby.

VAROVÁNÍ

Přetrvává-li některý z výše uvedených příznaků po třech dnech, cítíte-li bolest nebo se objeví začervenání, otok nebo teplota, okamžitě kontaktujte vašeho lékaře.

Nepoužijte toto zařízení s pomády nebo krémy které obsahují látky pro topickou anestezii (lidokain, xylokain,)

Používání tohoto produktu splňuje specifické potřeby každého pacienta na lékařské a chirurgické aplikace. Není to zařízení určené pro všeobecné účely vyžadující asistenci specialisty při prvním nasazení nebo lékařskou kontrolu pro zbytek kúry. Toto zařízení se běžně používá v kosmetických aplikacích a v tom případě se lékařská rada a kontrola doporučují jenom jako volitelná možnost. Cítí-li pacient jakoukoliv abnormalitu při používání, je nutné konzultovat lékaře.